

ULTIMATE

BEZINWAZYJNY  
LIFTING TWARZY  
I MIKRODERMABRAZJA  
ROTACYJNA



# ULTIMATE

## Bezinwazyjny Lifting Twarzy & Mikrodermabrazja Rotacyjna

Po ponad 20 latach przeprowadzonych badań stworzono urządzenie CACI, które zostało wybrane i nagrodzone jako najbardziej skuteczna terapia anti-aging dostępna na rynku\*.

Urządzenie CACI Ultimate jest jedynym urządzeniem dającym możliwość przeprowadzania aż 3 zabiegów: bezinwazyjnego liftingu twarzy, bezkryształkowej mikrodermabrazji rotacyjnej oraz terapii światłem LED. Dzięki wielofunkcyjności urządzenia można proponować klientowi kompletną ofertę bezinwazyjnych zabiegów dermatologii estetycznej.

### MIKRODERMABRAZJA ROTACYJNA

Mikrodermabrazja rotacyjna to nowa technologia złuszczenia martwego naskórka, w której używa się jednorazowych nakładek złuszczących, obracających się ze zmienną prędkością wokół eliptycznej osi. Nakładki pokryte są węglikiem krzemu – pozyskiwanego laboratoryjnie minerału o twardości niewiele mniejszej od diamentu. W zależności od potrzeb, metoda ta pozwala na bardzo powierzchowne lub głębokie złuszczenie naskórka. Ta unikalna, bezkryształkowa i bezpróżniowa metoda złuszczenia pozwala uniknąć typowych problemów związanych z tradycyjną mikrodermabrazją – z dezynfekcją i konserwacją standardowych urządzeń do mikrodermabrazji.

Wokół głowicy ze złuszczącą nakładką znajduje się lampa LED, która może być wykorzystywana w czasie zabiegu mikrodermabrazji lub w czasie masażu – jednocześnie ze specjalną głowicą do masażu. Światło LED głęboko stymuluje tkankę łączną, co poprawia krążenie krwi i limfy.

#### KORZYŚCI Z MIKRODERMABRAZJI ROTACYJNEJ

- Metoda bezkryształkowa – klient nie wdycha kryształków korundu, nie jest narażony na podrażnienia z nimi związane
- Metoda bezpróżniowa – skóra nie jest naciągana i zasysana
- Urządzenie nie zatyka się
- Wymienne końcówki dają klientowi poczucie higieny i komfortu
- Możliwość kontroli głębokości złuszczenia
- 4 poziomy intensywności
- 3 rodzaje końcówek (fine – delikatna, medium – średnia, coarse – intensywna)



Innowacyjna  
bezkryształkowa  
mikrodermabrazja  
wzbożona jednoczesną  
terapią światłem LED

#### MIKRODERMABRAZJA ROTACYJNA



PRZED



PO

Rotacyjny ruch głowicy ścierającej pozwala na stopniowe i kontrolowane złuszczenie naskórka oraz usuwanie zanieczyszczeń i niedoskonałości skórnych. Poprzez złuszczenie zewnętrznych warstw naskórka cera staje się czysta, promienna, gładka i wygląda młodziej. Rezultaty są widoczne już po 1 zabiegu.



## GRZEBIEŃ LED (TERAPIA ŚWIATŁEM LED)

Grzebień LED to połączenie fotostymulacji światłem LED z mikroprądami o wysokiej częstotliwości. Synergia tych dwóch technologii wypełnia od wewnątrz zmarszczki i wygładza skórę, zmniejsza też rozstęp. Jest to bezinwazyjna i bezbolesna alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej polegających na iniekcji kolagenu i innych dermo-wypełniaczy.

System CACI posiada opcję wyboru czerwonego lub niebieskiego światła LED oraz opcję wyboru strumienia światła LED, który jest wyjątkowo efektywny przy leczeniu trądziku oraz innych zmian skórnych.

## MIKROPRĄDY

Mikroprądy pierwotnie stosowane były do leczenia porażenia nerwu twarzowego a obecnie terapia z wykorzystaniem mikroprądów jest szeroko stosowanym zabiegiem przeciwstarzeniowym. W praktyce wykorzystuje się mikroprądy o natężeniu mniejszym niż 1 mA (<1mA), ponieważ współgrają one harmonijnie z polem bioelektrycznym naszego ciała. Zastosowanie wyższego natężenia wywołuje skurcze mięśni twarzy, co może przyczynić się do pogłębienia się zmarszczek i linii mimicznych. Nasze mikroprądy nie wywołują skurczu mięśni, lecz działają reedukująco na mięśnie i w ten sposób uzyskuje się pożądany efekt.

Ze względu na spektakularne efekty liftingujące i tonizujące, osiągnięte po zabiegu z wykorzystaniem mikroprądów urządzenia CACI, zabieg ten jest porównywany do liftingu chirurgicznego.

### GRZEBIEŃ LED



PRZED



PO

Niektóre długości fal światła LED w połączeniu z mikroprądami o wysokiej częstotliwości aktywują pompę sodowo-potasową. Wspomaga to wymianę komórkową, uwalnianie jonów sodowych, protein kolagenu oraz glikozaminoglikanów kwasu hialuronowego. Efektem jest wypełnienie zmarszczek od wewnątrz oraz pobudzenie odnowy komórkowej i procesów naprawczych w skórze.


## ZWIĘKSZ SWOJE PRZYCHODY DZIĘKI URZĄDZENIU CACI ULTIMATE

Kupując urządzenie CACI ULTIMATE, kupujesz więcej niż tylko urządzenie do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Otrzymujesz też możliwość wykonywania zabiegów anti-aging na światowym poziomie, które pomogą rozwinąć Twój biznes.


Niech sukces CACI stanie się też Twoim udziałem! To marka, która zwiększy Twoje dochody.

\* Przy założeniu, że zabiegi wykonywane są przez 6 dni w tygodniu, a 1 zabieg kosztuje 300 zł

### PRZYCHÓD TYGODNIOWY

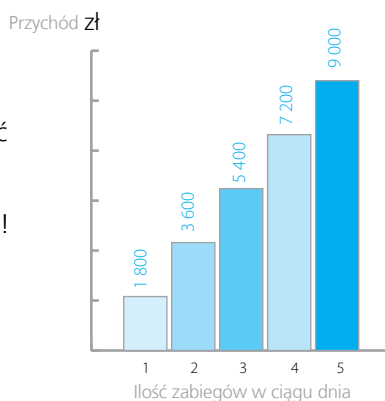

### PRZYCHÓD ROCZNY

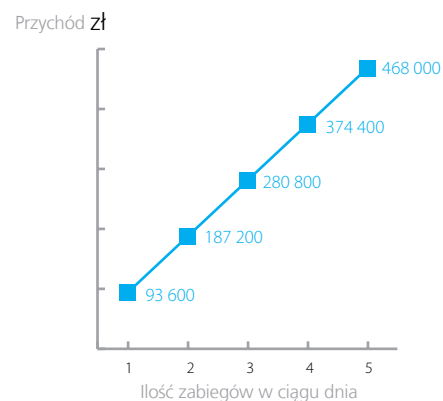

## HYDRATONE – NAWILŻANIE I ODMŁADZANIE



W zabiegu Hydratone połączono działanie elektrod zakończonych kulkami z Hydro Maską - unikalną, przewodzącą prąd, silikonowo-żelową maską, która ma spektakularne działanie nawilżające.

Kulkowe elektrody delikatnie masują twarz, a w tym czasie maska zostaje naładowana elektrycznie, dzięki czemu cała twarz „skąpana” jest w odmładzającej energii. Prąd dostarczany przez rolki do skóry uzupełnia potencjał bio-elektryczny w mięśniach twarzy, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i jędrne.

Wyzwolona energia transportuje składniki nawilżające zawarte w żelowej masce do głębszych warstw naskórka. Maska żelowa intensywnie nawilża skórę od wewnątrz, co powoduje spłycenie zmarszczek i drobnych linii. Zabieg HYDRATONE trwa tylko 10 minut a daje natychmiastowy efekt głębokiego nawilżenia i ujędrnienia skóry.



86 DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW

### ZABIEGI

Lifting twarzy	✓
Spłycanie zmarszczek i linii	✓
Zmniejszanie opuchnięć pod oczami	✓
Nawilżanie skóry	✓
Peeling skóry	✓
Leczenie zmian trądzikowych i zanieczyszczeń skórnych	✓
Zabieg na szyję	✓
Zabieg antycellulitowy (z ECM)*	✓
Likwidowanie rozstępów	✓
Zabieg na dłoń	✓

\* wyposażenie dodatkowe

### ELEKTRO APLIKATORY



Urządzenie CACI wykorzystuje specjalnie opracowane bawełniane aplikatory wypełnione serum, które przyspieszają i utrwalają rezultaty zabiegu. Serum zawiera heksapeptydy i inne aktywne składniki o działaniu anti-aging, dzięki czemu efekt liftingu twarzy widoczny jest od razu. Elektro-aplikatory nadają się również idealnie do sprzedaży detalicznej.

### MASAŻER ANTICELLULITOWY (ECM)




ECM to wyposażenie dodatkowe, które może być dołączone do każdego urządzenia CACI posiadającego funkcje mikroprądów. W urządzeniu ECM wykorzystane jest połączenie dobroczynnego wpływu masażu z efektywnością terapii mikroprądowej.

Rolki przewodzące emitują mikroprądy, które delikatnie stymulują zmęczone ramiona, łagodzą bóle kończyn i wzmacniają zwiótczałe mięśnie. Masażer Antycellulitowy wzmacnia mięśnie i zmniejsza obwody ciała poprzez pobudzenie drenażu limfatycznego i rozbijanie złożeń tłuszczowych.

“ Piszę, żeby wyrazić moje zadowolenie ze współpracy z Wami. Współpraca z zespołem CACI jest czystą przyjemnością. ”

Z. Pintar  
Bodyzone, Cambridge

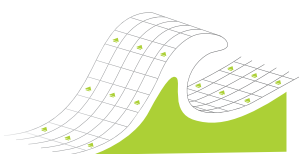

**UNIKALNOŚĆ  
URZĄDZENIA CACI**

Wszystkie urządzenia CACI wytwarzają mikroprądy o ultra niskiej częstotliwości, a moc jest sterowana cyfrowo.

To specjalistyczne oprogramowanie optymalizuje efekty i komfort zabiegu poprzez stopniowe zwiększanie mocy zabiegu aż do pokonania oporności skóry (prawo Ohma). Następnie urządzenie osiąga szczytową moc przewodząc energię mikroprądów głęboko do mięśnia.



Ekran dotykowy

## DANE TECHNICZNE

**Wymiary (cm):** 45 x 42 x 15

**Waga:** 9 kg

**Ekran dotykowy:** 10,4"

**Zasilanie:** 60 - 240 V

**Napięcie wyjściowe:** 30 V (maksymalnie)

**Zużycie:** 110 vA

**Klasa bezpieczeństwa 1 typ BF:** zgodnie z IEC 601 i IEC 601-2-10

**Kanały:** 4 niezależne

### MIKROPRĄDY

**Biegunowość:** dodatnia, ujemna i naprzemienna

**Zakres:** 20 uA do 640 uA

**Częstotliwość:** 0,1 Hz - 800 Hz

**Kształty fali:** 8

**Tryb pracy:** automatyczny sekwencyjny

### GRZEBIEŃ LED

**Wyjście:** 0,1 mA - 8 mA

**Częstotliwość wyjścia:** 6000 Hz

**Lampy LED 5 x niebieskie 430 nm - 40 mW**

**Lampy LED 5 x czerwone 640 nm - 30 mW**

### MIKRODERMABRAZJA ORBITALNA

**Prędkość obrotów:** 0 - 4000 rpm

**Napięcie silnika:** 6 - 15 Volts

**Natężenie w Amperach:** 0,1 - 0,5 Amps

**Lampy LED 5 x niebieskie 430 nm - 40 mW**

**Lampy LED 5 x czerwone 640 nm - 30 mW**